



Aculas-AM

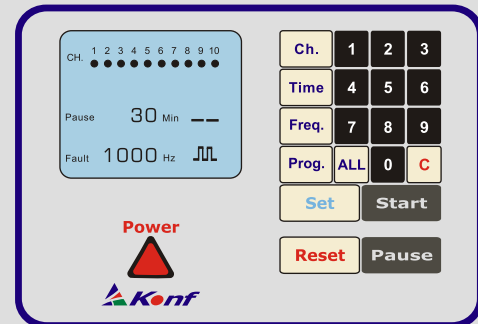
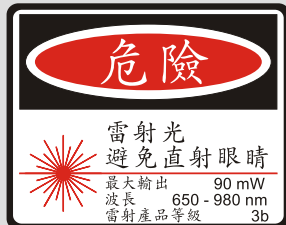
Multi-channel Digital Laser Acupuncture

多頻道雷射光針治療儀

多頻道光針治療儀

Operation Manual

操作手冊



English

<u>Title</u>	<u>Page</u>
Front Panel-----	1
LCD Display-----	2
Rear Panel-----	3
Preparation Steps---	4
Operation Steps-----	5
Operation Steps-----	6
Operation Steps-----	7
Operation Steps-----	8

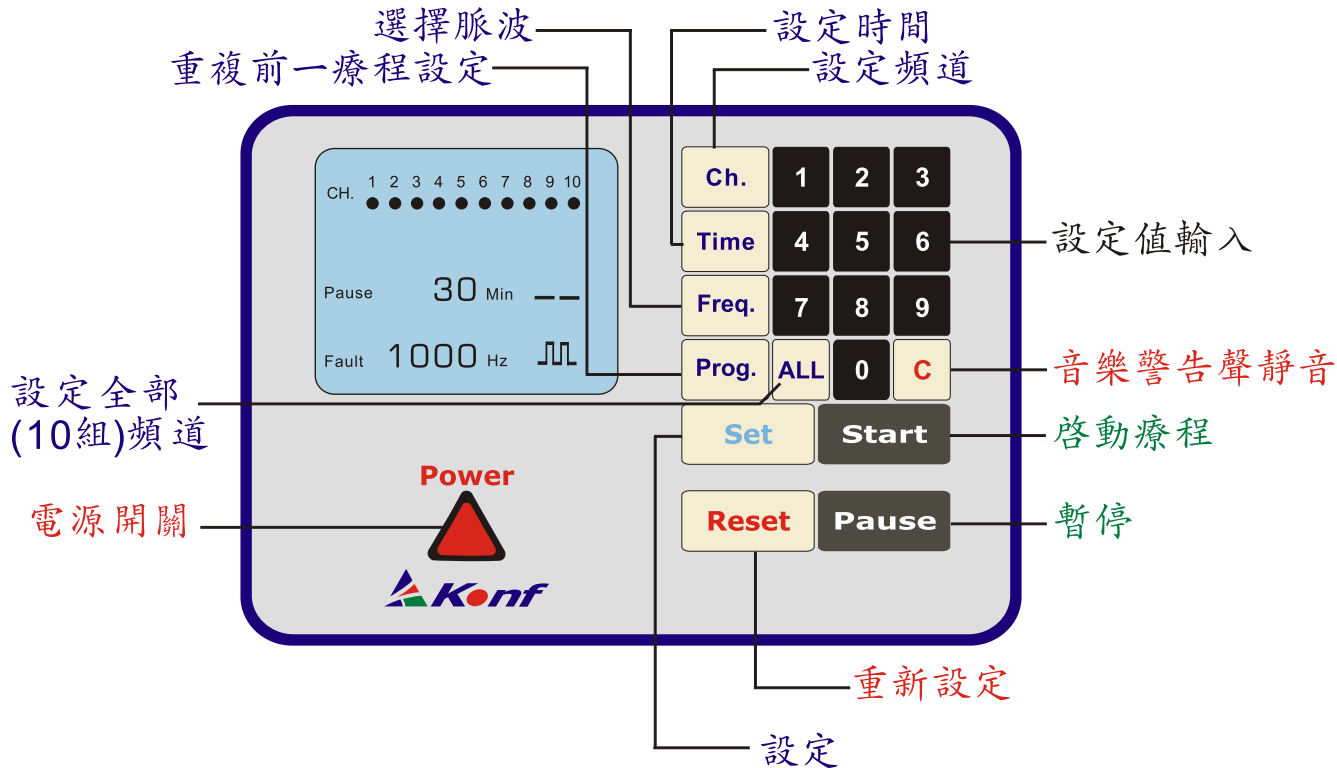
中文繁體

<u>主題</u>	<u>頁次</u>
面板-----	9
顯示螢幕-----	10
背板-----	11
操作前準備-----	12
操作說明-----	13
操作說明-----	14
操作說明-----	15
操作說明-----	16

中文简体

<u>主题</u>	<u>页次</u>
面板-----	17
显示萤幕-----	18
背板-----	19
操作前准备-----	20
操作说明-----	21
操作说明-----	22
操作说明-----	23
操作说明-----	24

面板



顯示螢幕

頻道 CH. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

時間(分鐘) 30 Min 連續波

暫停

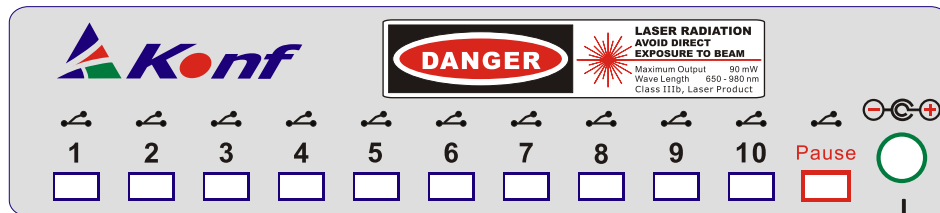
Pause

脈波頻率 1000 Hz 脈波

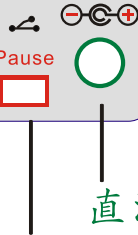
故障

Fault

背板

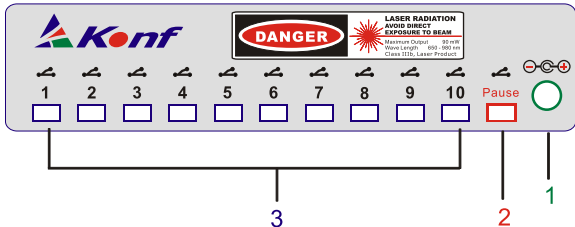


光針模組插座



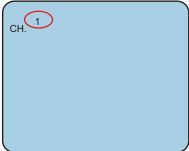
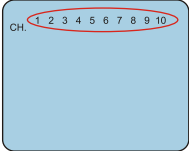
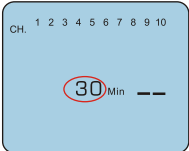


遙控暫停插座
直流電源插座

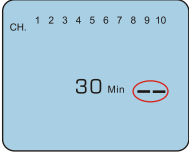
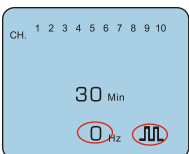
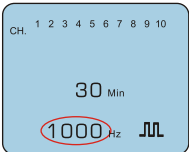
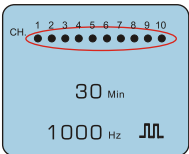
操作前準備

操作前準備			圖示
步驟	動作	說明	
1	接上電源	將電源模組接上電源； 另一接頭插入背板	 <p>The diagram shows the control panel with 10 numbered ports (1-10) and a Pause button. A line connects port 3 to the label '3'. Another line connects the Pause button to the label '2'. A third line connects the green power button to the label '1'.</p>
2	接上遙控暫停 開關	將遙控暫停開關接頭 插入背板	
3	接上光針模組	將光針模組黏貼於經絡 穴位上，連接線分別接 至背板	


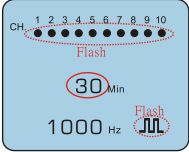

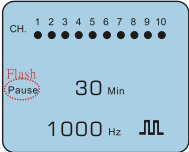


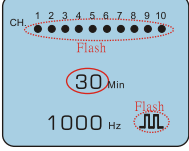
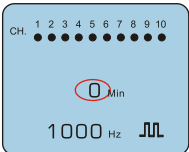
操作說明

操作			LCD 顯示	備註
步驟	動作	按鍵		
1	開啓電源	Power 		
2-a	設定個別 (1~10)頻道	Ch. 1 Set		依序選擇： 2, Set; 3, Set; -----
2-b	設定全部 (10組)頻道	Ch. ALL Set		
3	設定時間	Time 3 0 Set		設定時間： 1 ~ 60 分鐘


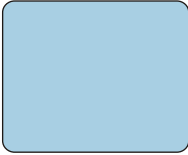


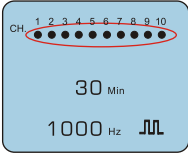

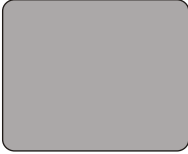
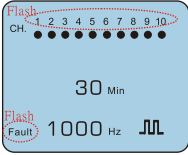
操作說明

操作			LCD 顯示	備註
步驟	動作	按鍵		
4-a	選擇連續波	無		
4-b	選擇脈波	Freq.		
5	設定脈波頻率	1 0 0 0 Set		設定脈波頻率： 1 ~ 1000 Hz
6	3 秒後自動 進入待命狀態	無		

操作說明

操作			LCD 顯示	備註
步驟	動作	按鍵		
7	啟動療程			
◎	操作面板暫停			音樂警告No.1
	遙控暫停			
	音樂警告聲靜音			
◎	暫停後啟動			
◎	時間歸零； 療程完成			音樂警告No.2 (15秒後自動停止)

操作說明

操作			LCD 顯示	備註
步驟	動作	按鍵		
◎	重新設定			
◎	重複療程設定	 		重複前一療程設定
◎	關閉電源			
★	故障			音樂警告No.3



康禾股份有限公司

www.konftec.com

[e-mail:service@konftec.com](mailto:service@konftec.com)

Konftec Corporation