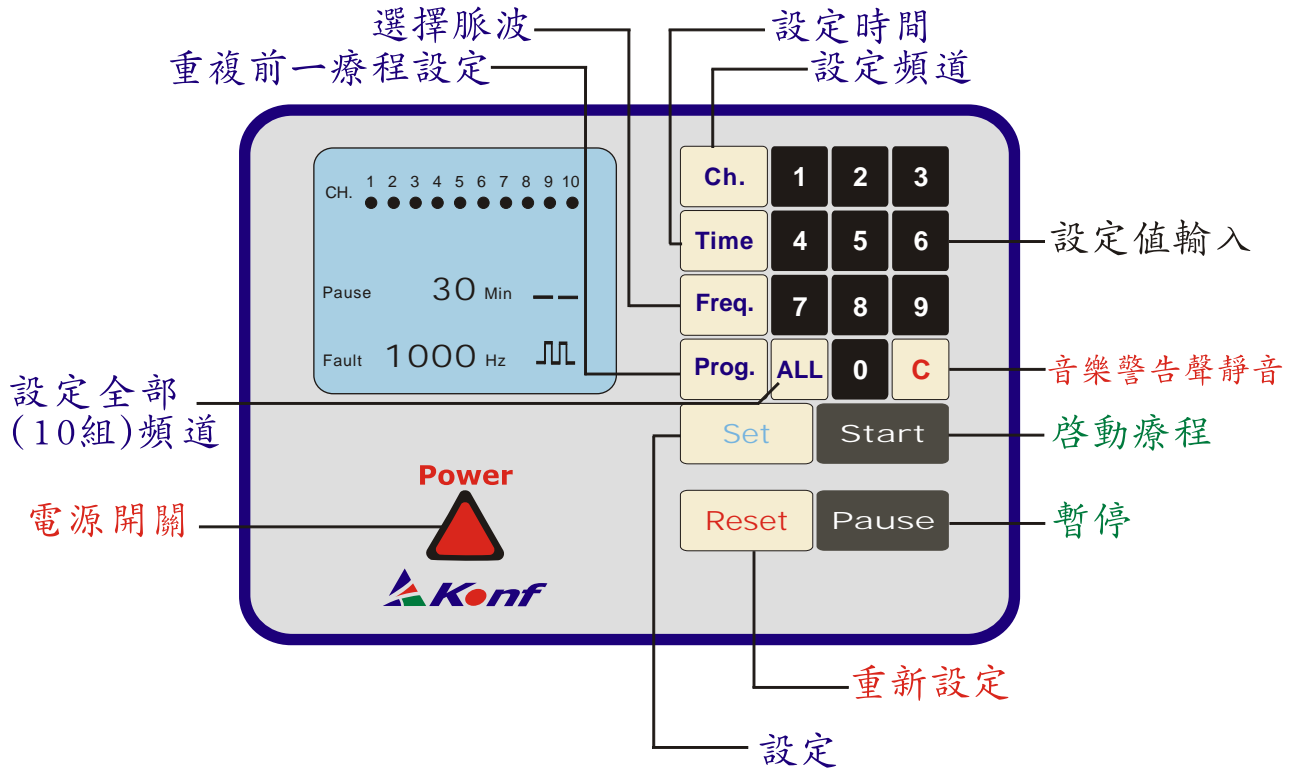
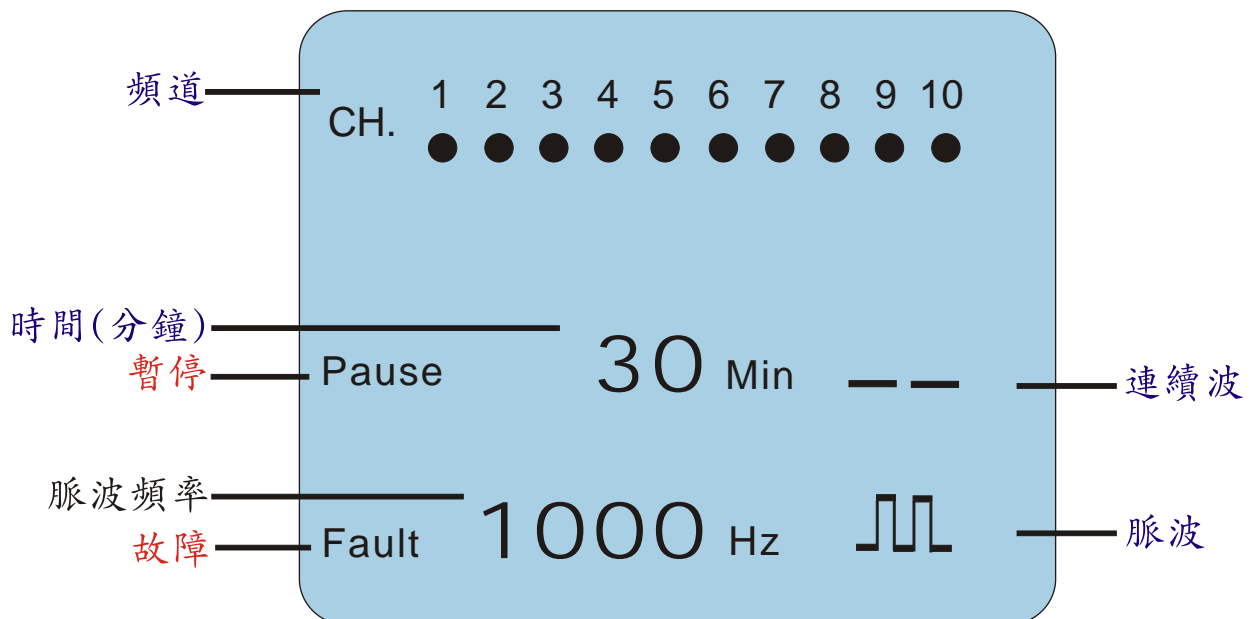


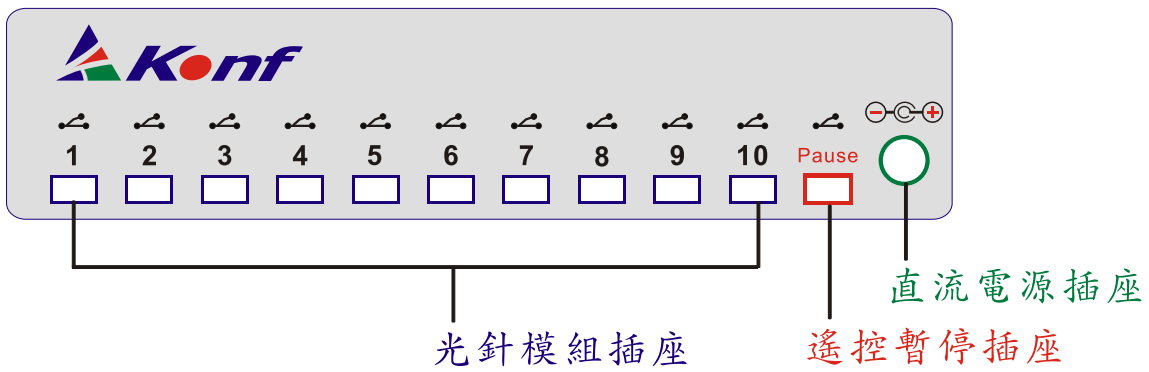
### 面板



### 顯示螢幕



背板


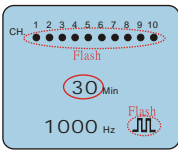

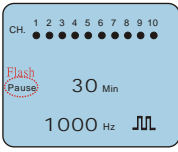


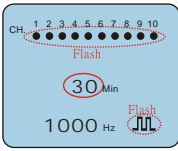
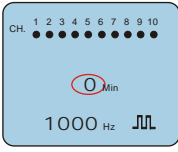

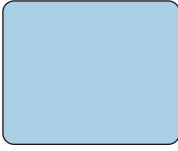


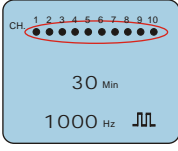

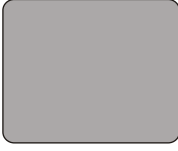
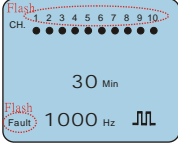


操作前準備

操作前準備			圖示
步驟	動作	說明	
1	接上電源	將電源模組接上電源； 另一接頭插入背板	<p>The diagram shows the backboard with three connection lines: a green line labeled '1' pointing to the DC power socket, a red line labeled '2' pointing to the Pause socket, and a blue line labeled '3' pointing to the 10 optical needle module sockets.</p>
2	接上遙控暫停 開關	將遙控暫停開關接頭 插入背板	
3	接上光針模組	將光針模組黏貼於經絡 穴位上，連接線分別接 至背板	

操作			LCD 顯示	備註
步驟	動作	按鍵		
1	開啓電源	<b>Power</b> 		
2-a	設定個別 (1~10) 頻道	<b>Ch.</b> <b>1</b> <b>Set</b>		依序選擇： 2, Set; 3, Set; -----
2-b	設定全部 (10組) 頻道	<b>Ch.</b> <b>ALL</b> <b>Set</b>		
3	設定時間	<b>Time</b> <b>3</b> <b>0</b> <b>Set</b>		設定時間： 1 ~ 60 分鐘
4-a	選擇連續波	無		
4-b	選擇脈波	<b>Freq.</b>		
5	設定脈波頻率	<b>1</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>Set</b>		設定脈波頻率： 1 ~ 1000 Hz
6	3 秒後自動 進入待命狀態	無		

# 操作說明 (續)

操作			LCD 顯示	備註
步驟	動作	按鍵		
7	啓動療程			
◎	操作面板暫停			音樂警告No.1
	遙控暫停			
	音樂警告聲靜音			
◎	暫停後啓動			
◎	時間歸零； 療程完成			音樂警告No.2 (15秒後自動停止)
◎	重新設定			
◎	重複療程設定	 		重複前一療程設定
◎	關閉電源			
★	故障			音樂警告No.3